



**SOUTHERNIMPLANTS®**

Innovative Treatment Solutions

# PROTOCOLES DE NUMERISATION GUIDES CHIRURGICAUX ZYGOMATIQUES

Cire diagnostique pour réaliser le CT et la digitalisation de la prothèse provisoire et définitive.


## De la clinique au laboratoire

- Photographies intra-orales frontales et latérales
- Photographies extra-orales du sourire, au repos et du profil
- Photographies d'occlusion avec écarteur de joue
- Prise de mâchoire en alginate
- Rebasage complet avec du silicone fluide
- Scanner intra-oral de la bouche complète à l'extérieur de la bouche
- Scanner intra-oral de l'antagoniste en occlusion



## Envoi du laboratoire à la clinique

- Empreinte à la cire diagnostique au baryum avec points de gutta-percha
- Guide de positionnement occlusal

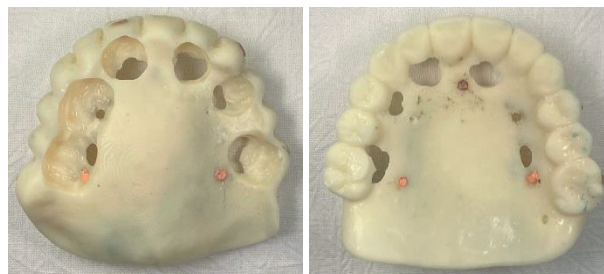

## Visite du patient à la clinique

Vérifier les paramètres esthétiques et prothétiques à l'aide de la cire de diagnostic barytée.

### SI L'ARTICULATION N'EST PAS CORRECTE

- Nouvelle articulation numérique de l'empreinte
- Photographies intra-orales frontales et latérales
- Photographies extra-orales du sourire, du repos et du profil
- Photographies en occlusion avec écarteur de joue



### SI L'ARTICULATION EST CORRECTE

- Effectuer un examen CT du patient en utilisant la technique du double examen CT

Pour réaliser le protocole de numérisation, contactez KuneLab :  
Iago Gonzalez  
iago@kuneimplants.com  
625 999 465

# Chirurgie terminée et piliers Multi-Units en place

## Option 1:

**Envoi préalable du laboratoire avant l'intervention chirurgicale de la prothèse provisoire**

- Le prothésiste fixe la prothèse provisoire en utilisant la technique conventionnelle.



## Option 2

**Le prothésiste avec les piliers Multi-Units et les coiffes de cicatrisation Southern Implants en place procède de la manière suivante :**

- Rebaser le wax-up de diagnostic marqué directement sur les capuchons de cicatrisation avec du silicone fluide en utilisant l'index de positionnement précédemment envoyé par le laboratoire.
- Prise d'empreinte à l'alginate directement sur les coiffes de cicatrisation



**Envoi le lendemain du laboratoire à la clinique :**

- Prothèse provisoire directement vissée
- Vérifier que la prothèse est passive avec un couple de vissage maximal de 10 Ncm.



### Avantages :

Permet de réaliser l'attelle de la prothèse esthétique sur la base du wax-up diagnostique le lendemain de l'intervention, sans perte de temps et en ajustant les piliers Multi-Unit et les piliers occlusaux.

Pour réaliser le protocole de numérisation, contactez KuneLab :  
Iago Gonzalez  
iago@kuneimplants.com  
625 999 465