

Bibliothèque SIDIGITAL

Dental Wings Instructions Installation

Téléchargez et installez la bibliothèque Dental Wings de Southern Implants en 3 étapes simples.

ETAPE 1

CONNECTEZ-VOUS À LA PAGE SIDIGITAL

ETAPE 2

SUPPRIMEZ LES ANCIENNES BIBLIOTHÈQUES
(UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS EXISTANTS)

ETAPE 3

INSTALLEZ LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE


ETAPE 1

ETAPE 1.1

Naviguer vers la page CAD/CAM - SIDIGITAL

Visitez southernimplants.fr et accédez à la page web en survolant l'onglet Produits & Services dans la barre de menu et cliquez sur "Bibliothèque CAD/CAM"

southernimplants.fr/bibliothèque-cad-cam

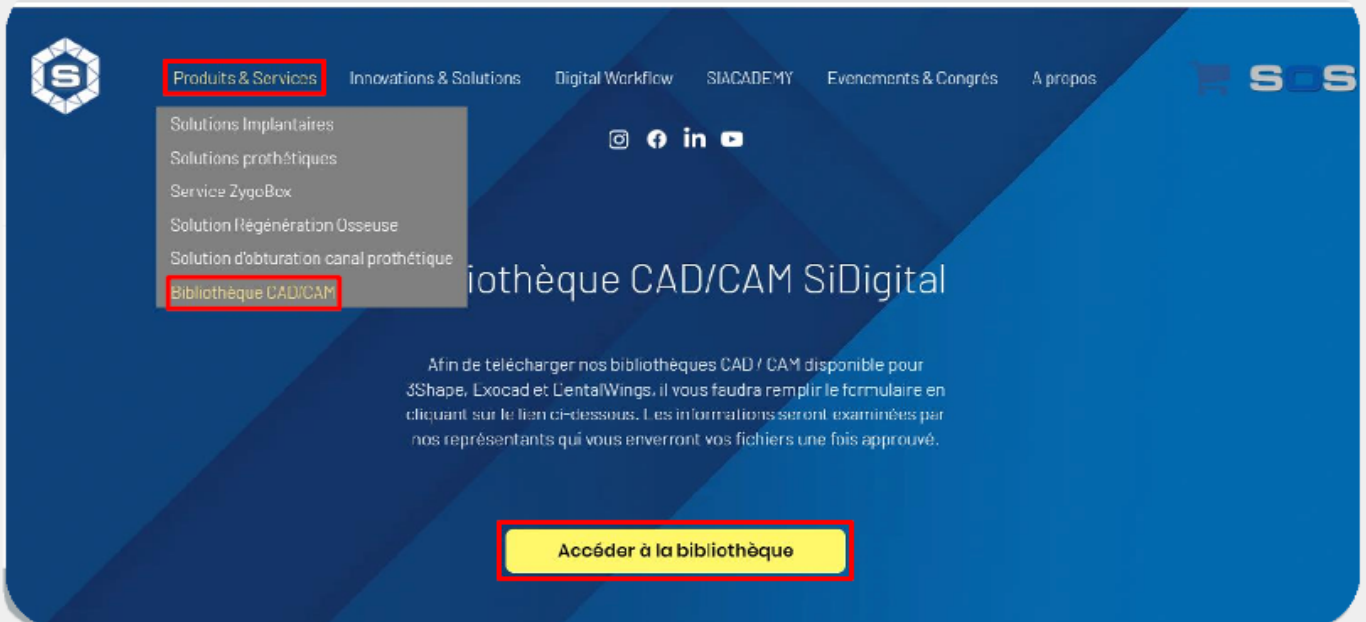

The screenshot shows the website's navigation menu with 'Produits & Services' highlighted. A dropdown menu is open, showing 'Bibliothèque CAD/CAM' as the selected option. Below the menu, the page title 'Bibliothèque CAD/CAM SiDigital' is visible, along with a yellow button labeled 'Accéder à la bibliothèque'.

ETAPE 1.2 Créer un nouveau compte/Se connecter

POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS

Créez un compte en cliquant sur « Cliquez ici pour vous inscrire ».

POUR LES UTILISATEURS EXISTANTS

Accédez à l'écran de connexion en cliquant sur « Cliquez ici pour télécharger ».

Accueil ▾ Solutions de traitement ▾ Produits innovants ▾ CAO/FAO - SIDigital ▾ Actualités et Evénements ▾ Centre de ressources ▾ Contactez-Nous 🔍

Bienvenue dans les bibliothèques SIDigital de Southern Implants pour :

3shape  **dental wings** **exocad**

instructions d'installation instructions d'installation instructions d'installation

Nouvel utilisateur:
Cliquez ici pour vous inscrire

Connexion des utilisateurs existants et nouvellement enregistrés :
Cliquez ici pour télécharger

Complétez et soumettez le formulaire. Un e-mail de confirmation contenant vos données de connexion vous sera envoyé dans les jours qui suivent. Vérifiez vos e-mails indésirables si vous ne le recevez pas dans les 48 heures. Accédez à la page de connexion en cliquant sur le lien figurant dans l'e-mail ou en retournant à l'adresse suivante : <https://southernimplants.com/cad-cam-download/>

From: sidigital@southernimplants.com
Sent:
To:
Subject: SI Digital Library Login Details

Good day,

Thank you for registering to SIDigital. To download, click on this link Access SIDigital

Username:
Password:

Kind regards,
SI Digital Team

Saisissez votre mot de passe et votre adresse électronique
(n'oubliez pas de procéder à la vérification CAPCHA).

Connectez-vous pour télécharger les bibliothèques CAD/CAM :

Ce contenu est protégé par mot de passe. Pour accéder au contenu, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous:

>> [Mot de passe oublié ?](#)

Mot de passe:

Mot de passe:

Je ne suis pas un robot 

ETAPE 1.3

Télécharger la bibliothèque Dental Wings

Cliquez sur " Télécharger la dernière version" pour lancer le téléchargement.

The screenshot shows the Southern Implants website interface. At the top, there is a navigation menu with items: Home, Treatment Solutions, Innovative Products, CAD/CAM - SIDigital, News & Events, Resource Library, and Contact Us. A search icon is also present. The main heading is "Download SIDigital Libraries". Below this, there is a prompt "Please choose your software:" and a contact email "sidigital@southernimplants.com". Four software download cards are displayed in a row:

- 3shape USA Encrypted**: Includes an American flag icon and a "Download latest version" button.
- 3 Shape**: Includes a "Download latest version" button.
- Dental Wings**: Includes a "Download latest version" button, which is highlighted with a red rectangular box.
- Exocad**: Includes a "Download latest version" button.

Below the software cards, there are four links to change logs, each with a circular icon:

- 3 Shape USA Encrypted Change Log
- 3 Shape Change Log
- Dental Wings Change Log
- Exocad Change Log


REMARQUE : Un récapitulatif des modifications de toutes les révisions de la bibliothèque est disponible en bas de l'écran.

ETAPE 2 SUPPRESSION DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE PRÉCÉDENTE (UTILISATEURS EXISTANTS UNIQUEMENT)

ETAPE 2.1

Supprimer la bibliothèque Dental Wings enregistrée sur votre ordinateur local

Accédez à votre disque dur local (C:) et supprimez le dossier DWOS (Southern Implants Dental Wings) existant.

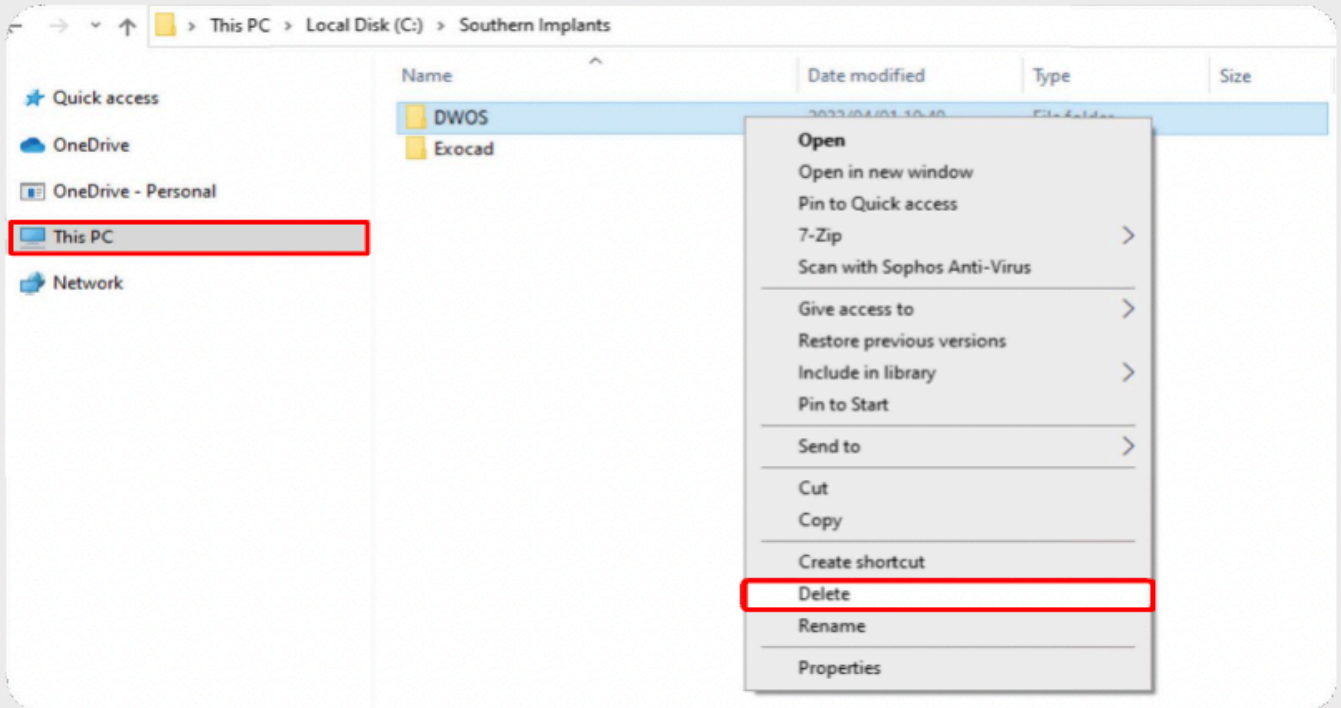


Dans les cas où la bibliothèque précédente était installée à un autre endroit, il est essentiel que l'utilisateur se rende dans le bon répertoire et supprime la bibliothèque.

ETAPE 2.2


Ouvrez et accédez au menu "Kits d'implants".

Accédez au logiciel Dental Wings et, dans le menu des paramètres, cliquez sur "Kits d'implants".

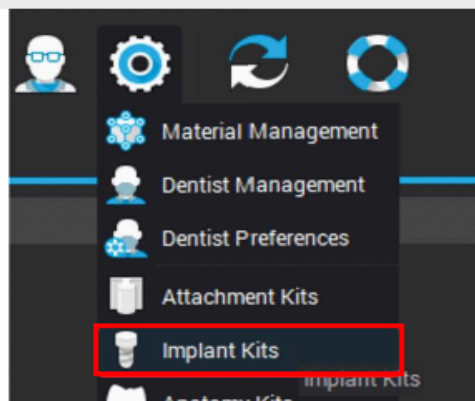


ETAPE 2.3 Ouvrez le menu déroulant

Faites défiler jusqu'au kit d'implants que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton déroulant.

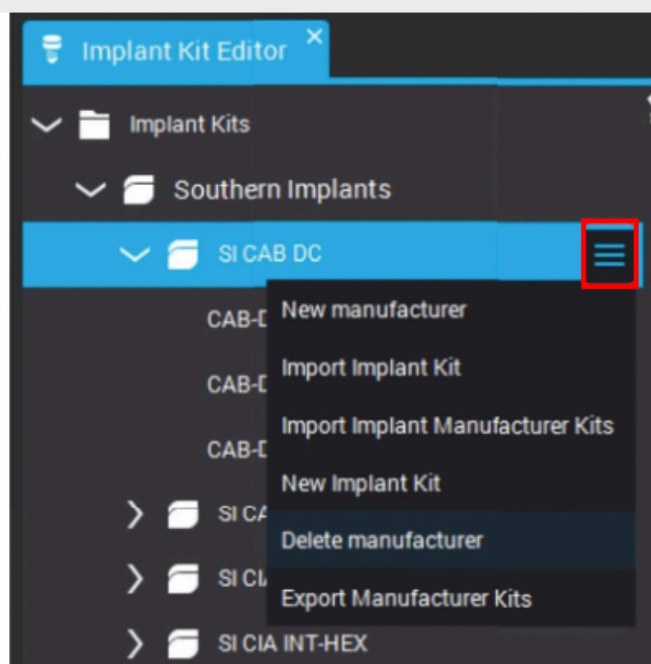

ETAPE 2.4 Supprimer les kits d'implants Cliquez sur "Supprimer le fabricant".

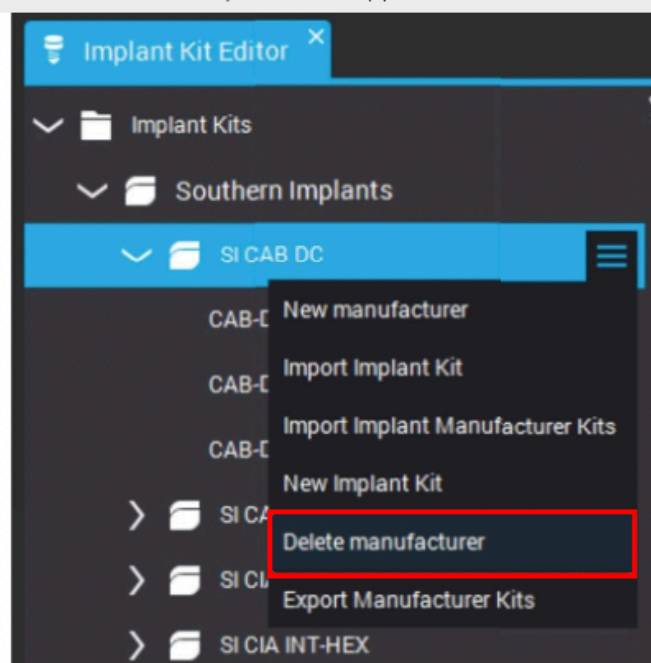

Répétez cette étape pour tous les kits d'implants nécessaires.


La bibliothèque est maintenant supprimée.

ETAPE 3

ETAPE 3.1

Accédez au fichier de la bibliothèque de Southern Implants et décompressez-le.


Accédez au dossier de téléchargement de votre ordinateur et décompressez le fichier de la bibliothèque dans un répertoire de votre choix.

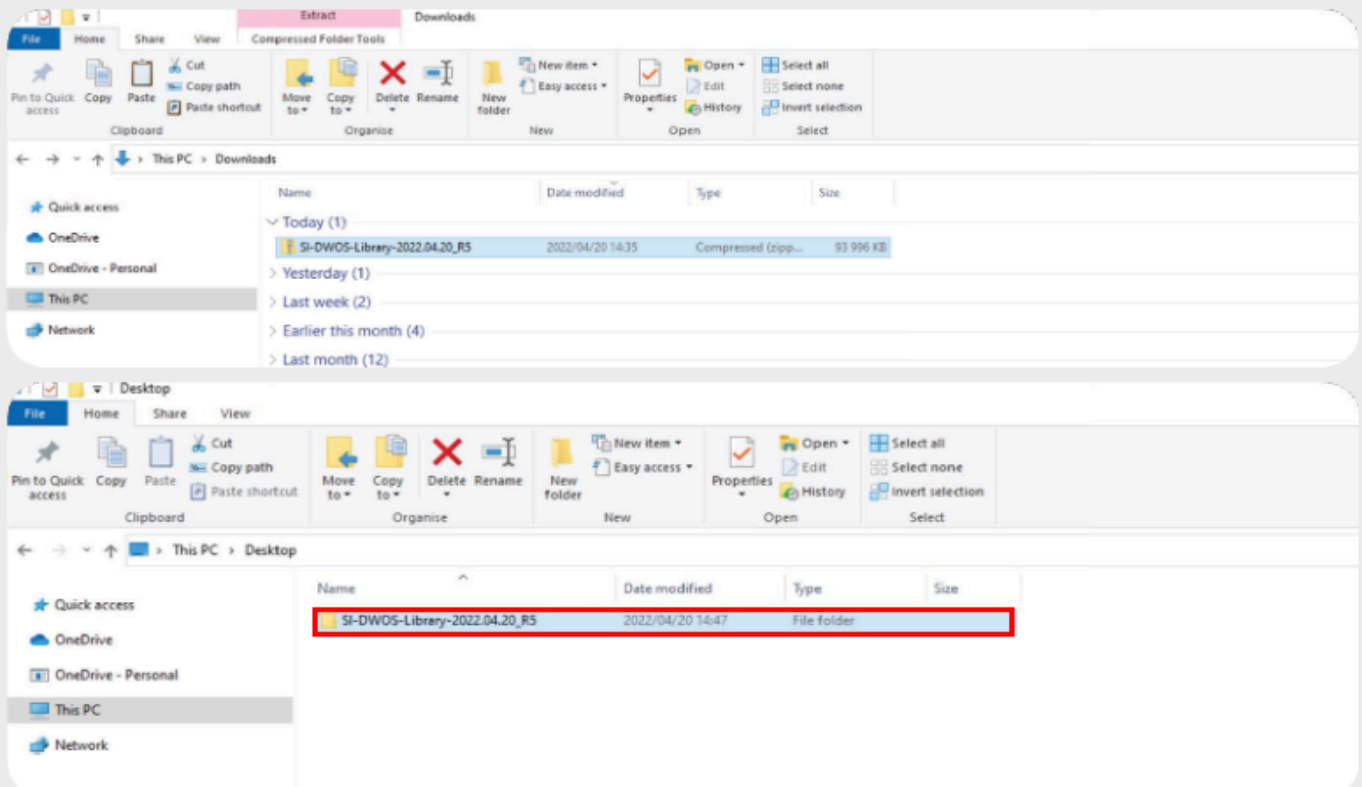

ETAPE 3.2

Accédez aux kits d'implants dans le logiciel Dental Wings.


Ouvrez le logiciel Dental Wings et naviguez jusqu'à "Kits d'implants" dans le menu déroulant "Paramètres".

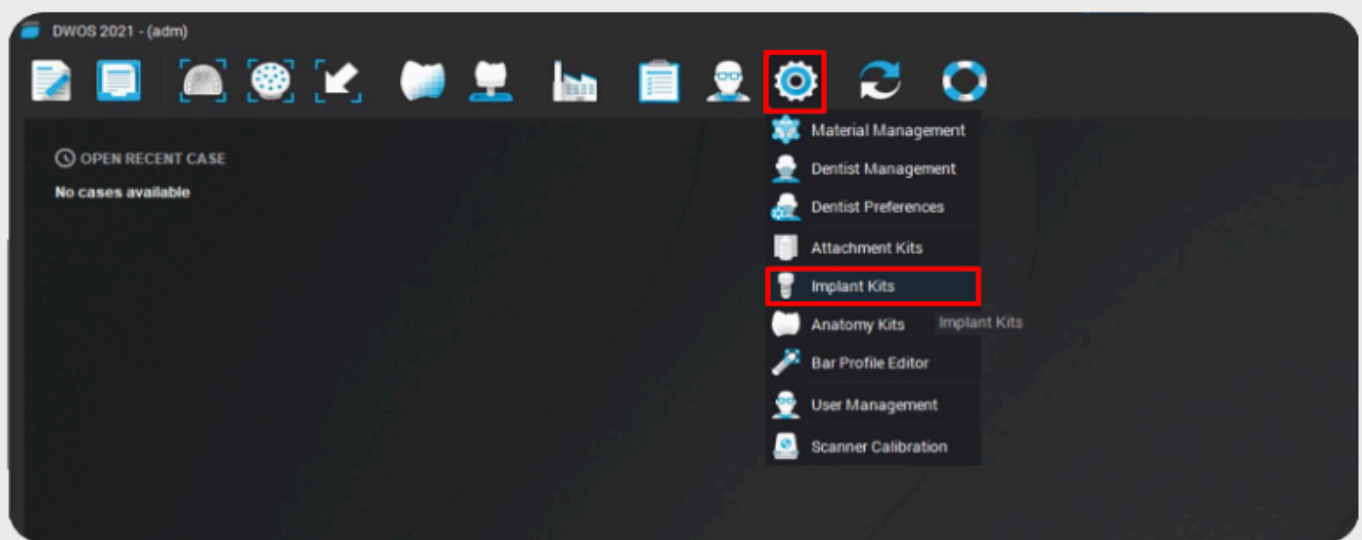


ETAPE 3.3

Créer un nouveau fabricant.

Pour les nouvelles installations, un nouveau fabricant doit être créé.
Cliquez sur le signe '+' en bas à gauche de l'application DWOS et cliquez sur 'Nouveau fabricant'.

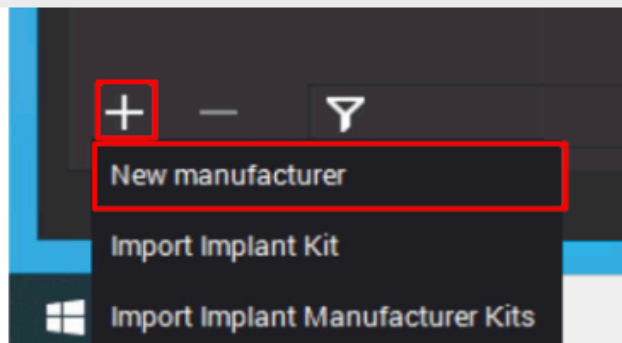


Tapez "Southern implants" sous le nom du fabricant et cliquez sur "Ok".

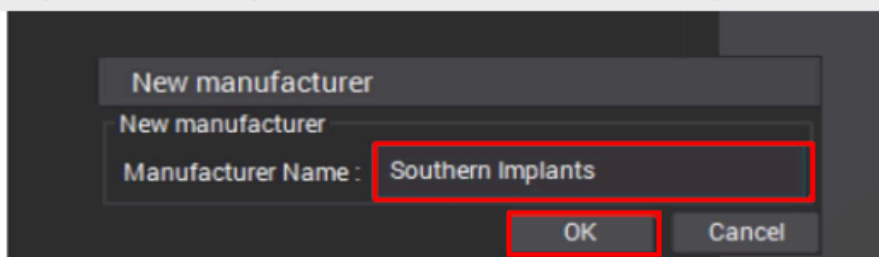


ETAPE 3.4

Cliquez sur le bouton "Importer un kit d'implants".

Dans l'onglet "Editeur de kit d'implants", sélectionnez 'Southern Implants'.

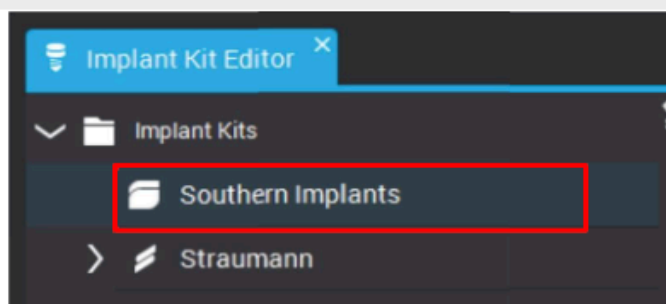


Cliquez sur "Importer un kit d'implants" dans le menu déroulant.

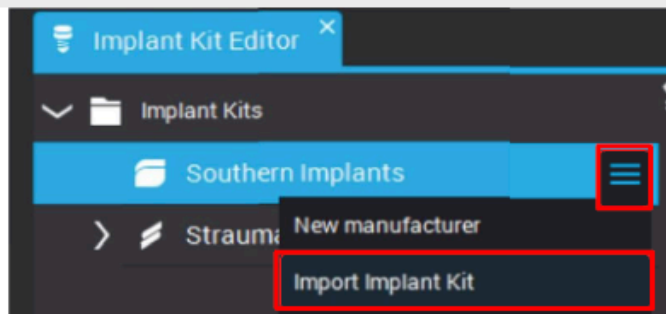


ETAPE 3.5

Téléchargez les fichiers de la bibliothèque dans Dental Wings.

Accédez au dossier SI Dental Wings dézippé de l'étape 3.1 et ouvrez le dossier correspondant au pilier que vous souhaitez télécharger dans Dental Wings.

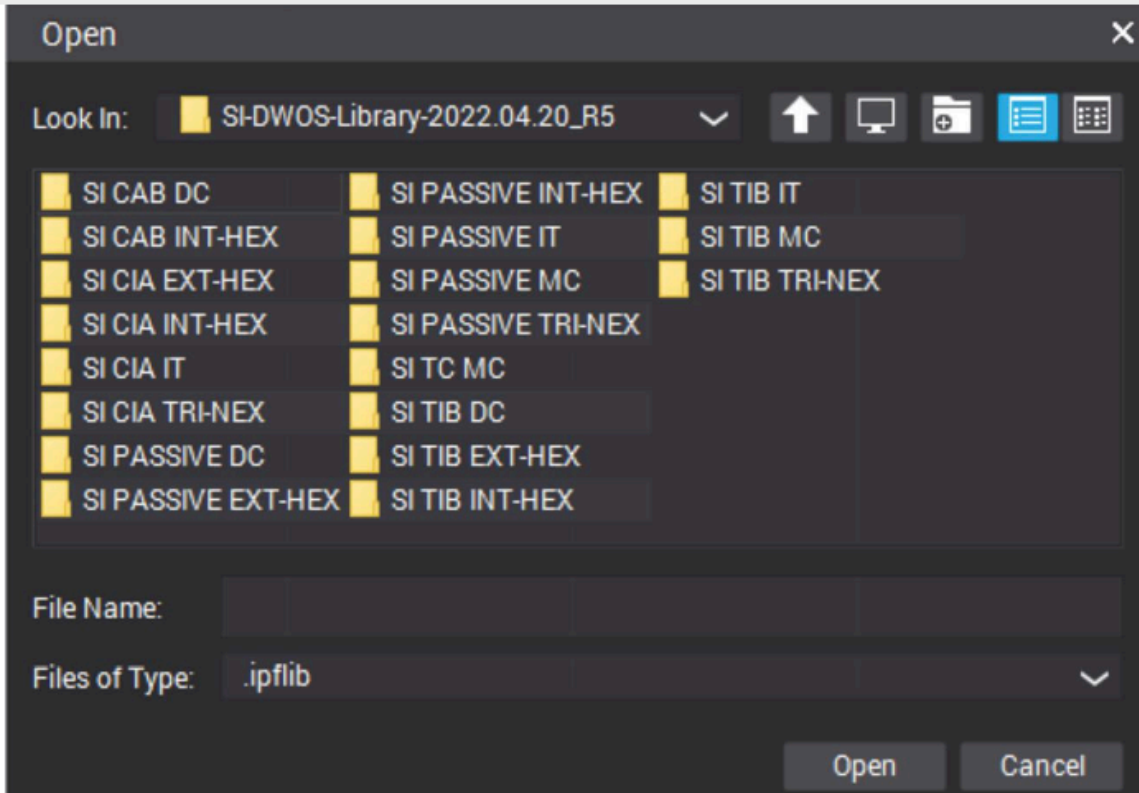

Sélectionnez tous les fichiers associés dans le dossier et cliquez sur "ouvrir".

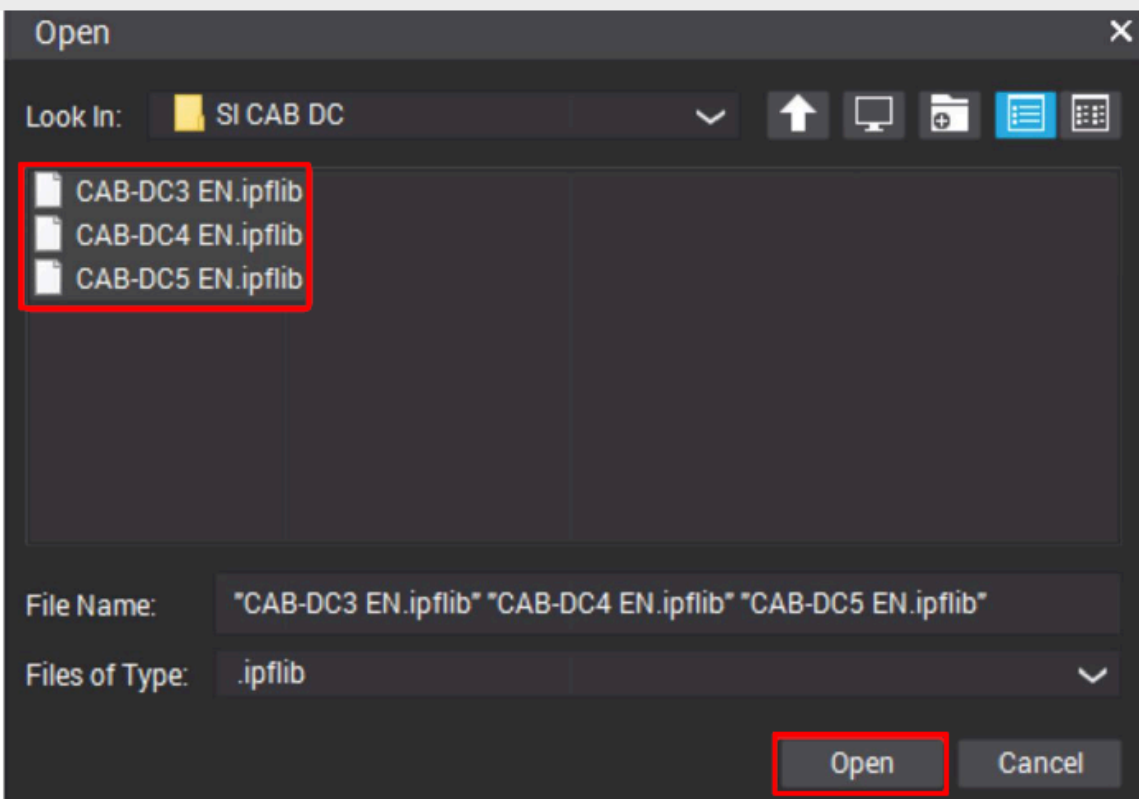

Répétez le processus de téléchargement pour tous les autres fichiers de pilier si nécessaire.

ETAPE 3.6

Confirmation de l'installation

Les bibliothèques mises à jour/installées sont répertoriées sous "Southern Implants" dans "Implant Kit Editor".



La bibliothèque Dental Wings est maintenant installée avec succès.